

**Pakkaus sisältää** kaksi (2) täysin samanlaista kappaletta, jotka muodostavat XCLIPin, kun ne asennetaan kyynärsauvan varteen ristikkäin. **Älä irrota asennusteippejä ennen asennusta!**

### XCLIPin ASENNUS

1. XCLIP asennetaan pituussäätöreikien yläpuolelle, sileään pintaan.
  2. Pyyhi sauvan varsi puhtaaksi mahdollisesta liasta.
  3. Istu tuolille, laita toinen kyynärsauva poikittain polviesi päälle.
  4. Aseta XCLIPin toinen puolisko putken alapuolelle ja paina pidike tiiviisti putkeen kiinni.
  5. Käännä toinen puolisko varren yläpuolelle, siipiosa itsestään pois päin.
  6. Lukitse ensiksi **punaisella** merkityt siivekepuolet yhteen: purista voimakkaasti kaksin käsin **punaisen** merkin kohdalta. Toista sama lukitus puristamalla myös toisen pään **punaisen** merkin kohdalla. Käännä halutessasi sauva toisinpäin.
  7. Lukitse seuraavaksi **vihreiden** merkien kohdalta klipsit samalla tavalla voimakkaasti puristamalla.
  8. **Varmista** vielä, että kaikki neljä lukitusklipsiä ovat lukittuneet ja että kappaleiden välissä ei ole rakoja. Poista asennustarrat – ja XCLIP on valmiina käyttöön!
- ⇒ **Jos käsien puristusvoima ei riitä**, voit lämmittää sisäpuolella olevaa tiivisteitä hiustenkuivaajalla TAI liukastamalla niitä saippualla. Voit myös käyttää työkalua kiinnittämiseen (esim. ”siirtoleukapihdit”).
- ⇒ **Huomioi**, että XCLIPin kiinnitys on suunniteltu siten, että kyynärsauvaa on mahdollista kääntää XCLIPissä. Älä siis säikähdä sitä, että XCLIP kääntyy kevyesti varressa! Sauvan kääntäminen mahdollistaa mm. portaissa kävelemisen



### XCLIPin KÄYTTÖVINKIT

#### Sauvan kiinnittäminen XCLIPiin

1. Varmista, että XCLIPin siivekkeet ovat sauvan kahvpuolella.
  2. Ota oikeaan käteen kyynärsauva, jossa on pidike ja vasempaan tyhjä sauva.
  3. Voit pitää otteen kyynärsauvan kahvalla, kuten kyynärsauvoilla kävellessä  
TAI  
voit siirtää käsien otteen kyynärsauvan kahvan yläpuolelle sauvan varteen, kuten kuvassa.
  4. TÄRKEÄÄ: Pidä kahvat suoraan eteenpäin tai hiukan ulospäin toisistaan.
  5. Pidä oikean käden kyynärsauva paikallaan ja aseta vasen sauva oikeassa sauvassa olevaan pidikkeeseen (vastaava kohta ja korkeus, missä pidike sijaitsee toisessa sauvassa).
  6. Tämän jälkeen sauvat voi asettaa tuolia/pöytää/seinää tai vaikka itseään vasten.
- ⇒ HUOM. pieni harjoittelu ja videoiden katsominen auttaa sinua saamaan XCLIPistä kaikki hyödyt irti \*)

#### Sauvan irrottaminen XCLIPistä

1. Paina kahvoja kevyesti yhteen, jolloin vasen sauva vapautuu pidikkeestä.

#### XCLIP-pidikkeen poistaminen sauvasta

1. Paina siipiosan vierestä kiinnitysklipsejä esim. talttapääruuvimeisselillä tai tukevalla avaimella, niin että ne vapautuvat kiinnityksestä.

